




AMPOULES AVEC GAZ STERILISANT - MODE D' EMPLOI • STÉRILIZATION MANUELLE

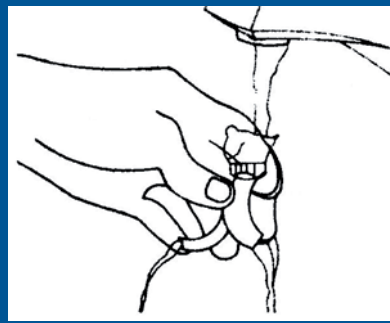


1. Le lavage des éléments à stériliser doit être l'eau et au savon.

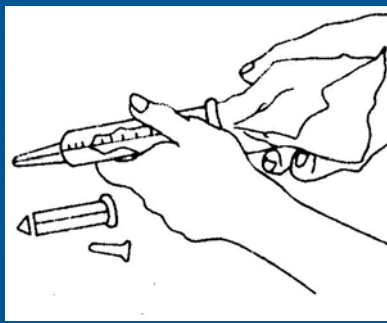


2. Les éléments lavés et essuyé doivent être enveloppés par séparé.

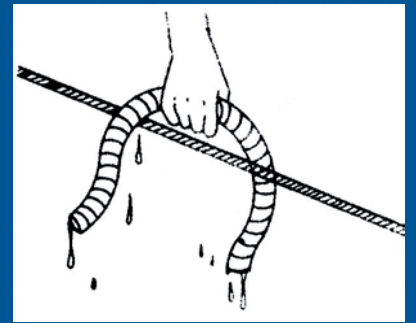

3. Pendre les parties longues deux tubes plastiques ou de caoutchouc pour que l'eau s'égoutte.

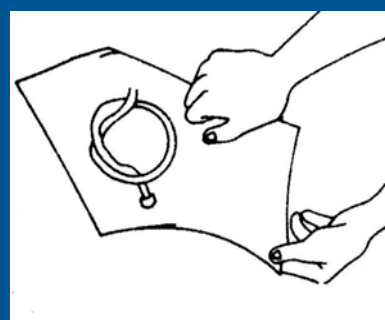


4. Envelopper le matériel par séparé à un tissu, un papier ou un polyéthylène.

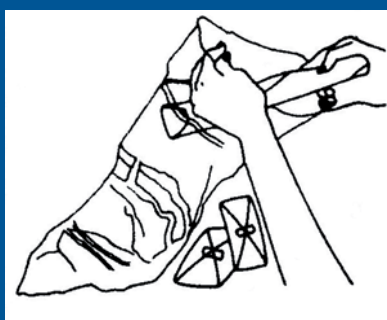


5. On doit introduire les éléments enveloppés par séparé dans le sac de contention.



6. On prend une ampoule BIOLENE sans ouvrir le sac dans lequel elle est enveloppée et casser le coulot de l'ampoule dans le tube protecteur.

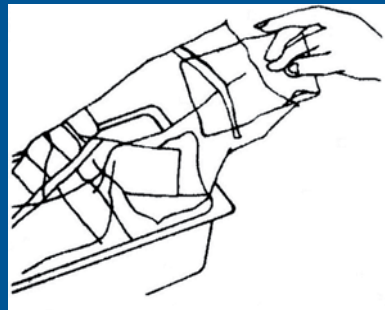


7. Envelopper le matériel par séparé à un tissu, un papier ou un polyéthylène.

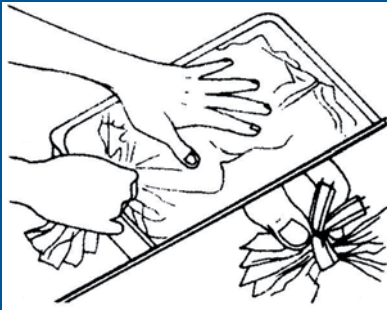


8. Chasser l'air du sac de contention et le fermer très bien par le lien.




9. Le sac de contention est placé dans le stérilisateur d'acier inoxydable et le fermer. On prend note dans la couvercle de la date et l'heure d'initiation du cycle de stérilisation.

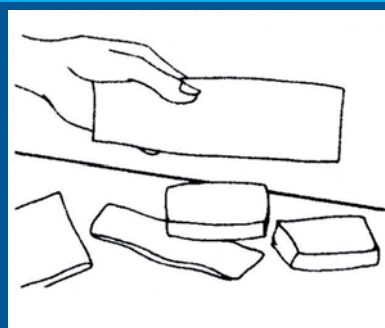

10. A la fin du cycle de 12 heures, ouvrir le stérilisateur et enlever du sac les éléments stérilisés.

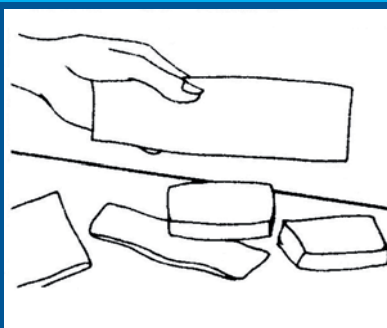

11. On doit placer les éléments stérilisés enveloppés pour que s'aèrent pendant un cycle de 12 heures. Les éléments qui ont beaucoup pores et qui seront utilisés sur le corps humaine doivent être ventilés pendant un cycle de 24 heures.

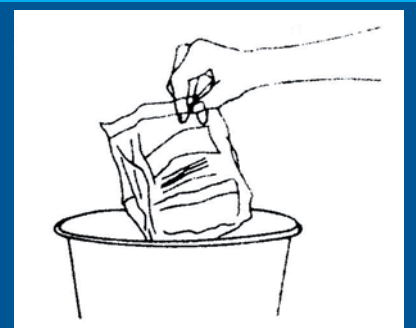

12. Le sac de contention et l'ampoule cassée peuvent être traités comme des déchets ordinaires.