



## AMPOLAS DE GAS ESTERILIZANTE - INSTRUÇÕES DE USO - ESTERILIZAÇÃO MANUAL

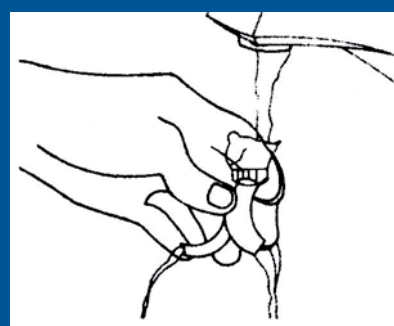

1. Lavar os elementos a ser esterilizados com água e sabão.

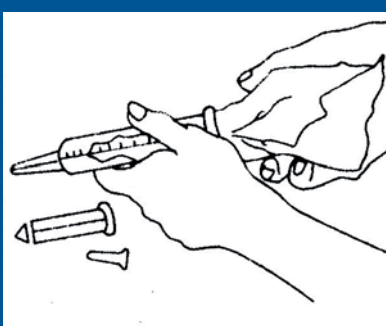

2. Secá-los com cuidado e embrulhá-los separadamente.




3. Tubos de plástico ou borracha compridos devem ficar pendurados até que toda a água tenha escorrido.




4. Embrulhe em tecido, papel ou polietileno cada objeto separadamente.



5. Coloque os elementos embrulhados individualmente dentro do saco para contenção.

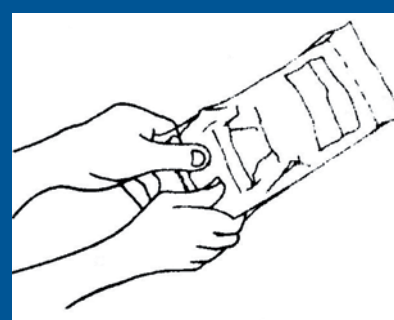

6. Pegue uma ampola de BIOLINE® sem abrir o invólucro, e quebre o gargalo, sem retirá-la do tubo protetor.

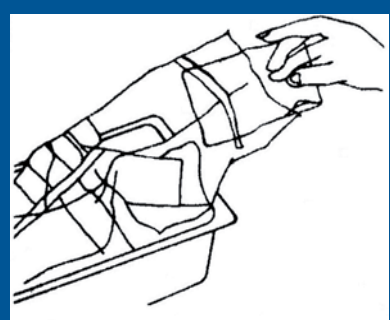


7. Coloque a ampola sobre os pacotes dentro do saco para contenção.




8. Retire o ar do saco para contenção e feche-lo retorcendo o precinto de segurança.




9. Coloque o saco para contenção em uma bandeja, feche-a e escreva na tampada e hora do início do ciclo de esterilização.

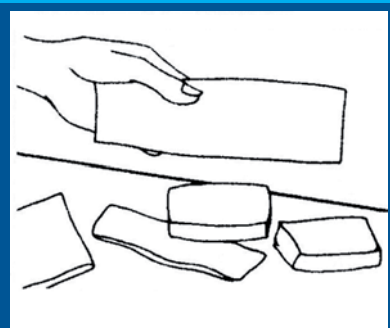

10. Após 12 horas retire do saco para contenção os elementos esterilizados.

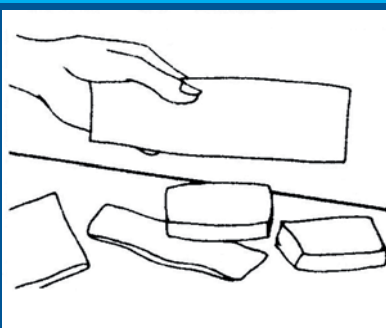

11. Areje os elementos, embrulhados, durante 24 horas. Os elementos de alta porosidade ou absorção, ou aqueles que serão utilizados no interior do corpo humano devem ser arejados durante 72 horas.

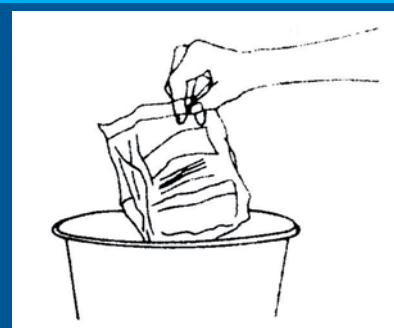

12. Os sacos para contenção e a ampola devem ser descartados.